

Verzorgingstips MediLime verlengslangen

Tip 1. Aansluiten van de verlengslang op de button:

- Wij adviseren u altijd eerst uw handen te wassen met water en zeep en goed af te drogen.
- Haalt u vervolgens het afsluitdopje van de button.
- Nu kunt u de verlengslang in de button steken door middel van de zwarte strepen op de verlengslang en de zwarte strepen op de button in één lijn te brengen.
- Tijdens het draaien is het advies om het doorzichtige deel van de slang vast te houden. Hiermee voorkomt u dat er teveel kracht wordt gezet. Draait u vervolgens voorzichtig $\frac{3}{4}$ slag rechtsom - met de pijl mee - tot de Lock.
- Voordat u voeding en/of medicatie gaat toedienen, adviseren wij u om de button en de verlengslang door te spoelen met 10 ml lauwwarm water. Bij kinderen kunt u 3-5 ml water gebruiken.

Tip 2. Voeden en/of medicatie toedienen:

- Gebruik de verlengslang in combinatie met een spuit om voeding en/of medicatie toe te dienen, tenzij u voeding via de pomp toedient.
- De adviezen voor sondevoeding en/of medicatie die u van uw behandelaar heeft ontvangen, zijn leidend.

Tip 3. Doorspoelen en loskoppelen van de verlengslang:

- Om de verlengslang los te koppelen van de button, draait u de verlengslang linksom, tegen de richting van de pijl in, totdat de zwarte strepen op de button in lijn zijn met de zwarte strepen op de verlengslang.
- Tijdens het draaien is het advies om het doorzichtige deel van de slang vast te houden. Hiermee voorkomt u dat er teveel kracht wordt gezet.
- Nu kunt u de verlengslang losmaken en het afsluitdopje van de button stevig terugzetten.
- Na elke voeding en/of medicatie adviseren wij u om de verlengslang door te spoelen met 10-20 ml lauwwarm water totdat de verlengslang helder is.
- Wij raden u ten zeerste af om koolzuurhoudende dranken te gebruiken. Het koolzuur kan de voeding en/of medicatie laten klonteren, waardoor het tegen de wand van de verlengslang aanplakt.
- Naast het doorspoelen van de verlengslang is het advies om ook de aansluiting en het schroefdraad goed schoon te spoelen.
- Om de verlengslang goed te drogen, kunt u er lucht doorheen spuiten.
- Als u de verlengslang heeft afgekoppeld, bewaart u deze op een droge en schone plek.

Tip 4. Verwisselen van de verlengslang:

- Wij adviseren u de verlengslang om de 1 à 2 weken te vervangen.

Wij willen u erop wijzen dat bovenstaande verzorgingstips adviezen zijn van Cobra Medical.

Deze kunnen afwijken van de protocollen die uw ziekenhuis of instelling gebruikt. Bij twijfel adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige.